

## HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK

Hartritme-diagnostiek op afstand




**DE PRAKTIJK**



**DE FUNCTIES**



**DE STAPPEN**

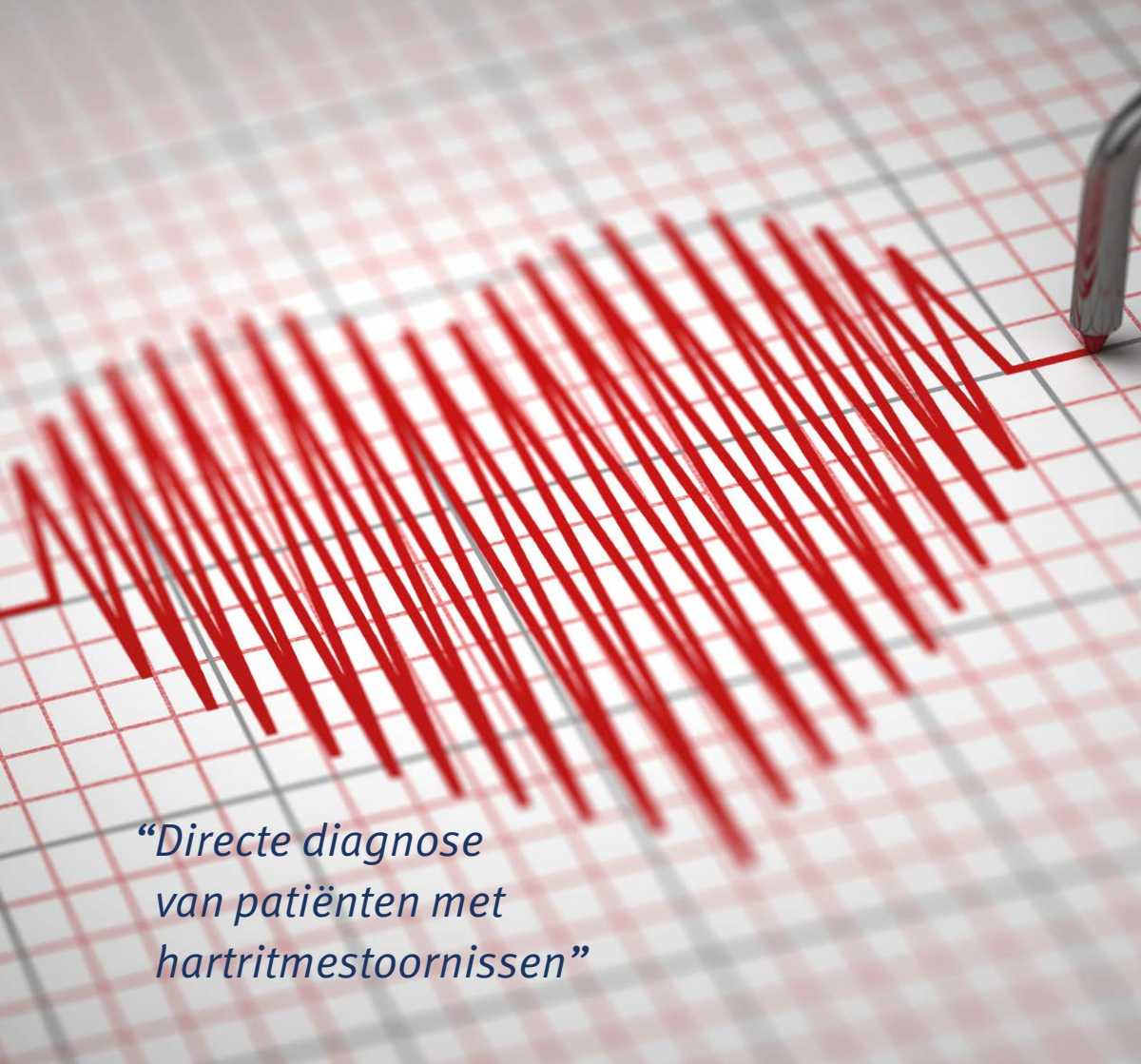

*“Directe diagnose van patiënten met hartritmestoornissen”*

## Hartis in uw praktijk

Hartritmestoornissen zijn vaak lastig vast te stellen. Kunt u als huisarts zelf behandelen of moet u juist doorverwijzen? Op die vraag krijgt u nu een goed antwoord: met de Hartis dienstverlening en bijbehorende Holter. Met deze compacte, gebruikersvriendelijke ECG recorder en onze uiteindelijke rapportage heeft u voldoende in handen om bij hartritmestoornissen de juiste diagnose te stellen.

Hartis Telezorg is gespecialiseerd in directe diagnostiek van patiënten met hartritmestoornissen. Met de Hartis Holter bieden wij u het juiste instrument om de elektrische activiteit van het hart te registreren en eventuele afwijkingen van het hartritme op te sporen.

### **Belangrijk voor de patiënt**

Uw patiënt draagt de Hartis Holter gedurende een bepaalde tijd bij zich. Bij klachten zoals o.a. hartkloppingen, hartoverslag en pijn op de borst kan de patiënt zelf het electrocardiogram (ECG) markeren. Daarnaast noteert de patiënt het tijdstip en de activiteiten rondom

het moment van de klacht in het bijgeleverde dagboek. Na afloop analyseren en beoordelen specialisten van Hartis Telezorg het ECG en voorzien de uitslag indien nodig van advies. U ontvangt de uitslag digitaal en kunt daarmee goed bepalen of u zelf kunt behandelen of doorverwijzing naar een tweede lijn nodig is.

### **Wilt u advies?**

Wilt u over individuele gevallen overleggen met ons cardiologisch team of advies over mogelijke behandelingen, dan kan dat tijdens ons dagelijkse collegiale spreekuur of tijdens een telefonisch intercollegiaal overleg.



DE PRAKTIJK



DE FUNCTIES



DE STAPPEN

“Betrouwbare diagnose op  
patiëntvriendelijke wijze”



#### **Multichannel Holter ECG-recorder**

2 lead registratie (maximaal 7 dagen)  
12 lead rust ECG  
Event marker voor event registraties  
Disposable lead systeem en elektrodes  
Oplaadbare accu voor 7 dagen registratie  
Flash geheugen  
Alle registraties zijn continu

#### **Singlechannel Event ECG-recorder**

1 lead wearable ECG-recorder  
Ongelimiteerde opnametijd (patiënt vervangt batterij)  
Spatwaterdicht  
Gebruikt standaard elektrodes  
Bluetooth communicatie mogelijk  
Registreert de door patiënt gemarkeerde events  
Detectie van ritmestoornissen door een gevalideerd algoritme

## De Hartis ECG opties



### **Holter ECG-registratie (24 uur, 48 uur of 72 uur)**

De Holter functie registreert het hartritme van uw patiënt gedurende de door u voorgeschreven periode.



### **Event ECG-registratie (7 dagen)**

Voor monitoring over een langere periode kiest u voor de optie van een 7 daagse registratie van het ECG. Bij klachten markeert de patiënt deze eenvoudig in het ECG door één druk op de knop.



### **Event ECG-registratie (langer dan 7 dagen)**

Voor monitoring langer dan 7 dagen (bijvoorbeeld voor AF screening) hebben wij onze 1 kanaals wearable ECG-recorder beschikbaar. Een kleine patiëntvriendelijke ECG-recorder die op de huid gedragen wordt.



### **Rust ECG-registratie**

Een 12 afleidingen rust ECG van 30 seconden geeft informatie over eventuele structurele en functionele aandoeningen van de hartspier.



### **Spoed-ECG**

Een spoed-ECG kan onder bepaalde omstandigheden worden gekozen. De registratie wordt dan met voorrang en spoed behandeld. U ontvangt de uitslag digitaal met direct aanvullend intercollegiaal overleg.



DE FUNCTIES

DE STAPPEN



*“U ontvangt het diagnoserapport  
binnen twee werkdagen in uw HIS”*

## Het gehele proces

### Stap 1. Aansluiten

De patiënt wordt aangesloten op de Hartis Holter. Dit kunt u zelf doen als u de holter een eigen beheer heeft, of laten doen door een uitgiftepunt bij u in de buurt. Voor een instructie van het aansluiten van een patiënt verzorgt Hartis een uitgebreide training in uw praktijk. Tevens hebben wij een online instructievideo beschikbaar.

### Stap 2. Registratie

Gedurende de door u voorgeschreven periode draagt de patiënt de Hartis Holter bij zich. De holter registreert dag en nacht het hartritme. Op het moment dat de patiënt klachten heeft drukt hij op de knop van de holter. Daarmee markeert hij het ECG. De patiënt noteert in het meegegeven dagboek de activiteit op het moment van de klacht. Na afloop van de voorgeschreven periode levert de patiënt de holter en het dagboek in bij u of bij het uitgiftepunt waar hij de holter heeft opgehaald.

### Stap 3. Uitlezen Hartis Holter

Indien u de Hartis Holter in eigen beheer heeft, sluit u de ingeleverde holter aan op uw computer. Het ECG wordt met behulp van de meegeleverde software uitgelezen en beveiligd verzonden naar Hartis Telezorg. Het bijbehorende, door de patiënt ingevulde, dagboekje stuurt u ons per fax of mail. Indien de holter is meegegeven door een uitgiftepunt, verzorgt dit uitgiftepunt het uitlezen en versturen van het ECG voor u.

### Stap 4. Rapportage

Het medisch team van Hartis beoordeelt het ECG en stelt het diagnoserapport op. U ontvangt dit rapport binnen twee werkdagen via een digitale beveiligde omgeving en is in te lezen in uw HIS. Het rapport bevat de vraagstelling, een samenvatting van de bevindingen en de conclusie. Een uitgebreide ECG-rapportage is beschikbaar en te downloaden vanaf het beveiligde Hartis portaal.



## De Hartis Service

- ♥ **Vier functies**  
Één apparaat met vier functies voor de registratie van hartrimestoornissen.
- ♥ **Continue registratie**  
De Hartis Holter registreert continu het hartritme, ook bij een Event ECG registratie.
- ♥ **Snelle uitslag direct in uw HIS**  
Wij versturen de uitslag binnen 48 uur. De uitslag wordt beveiligd digitaal verzonden en is direct in uw HIS in te lezen.
- ♥ **Efficiënte doorverwijzing naar de tweede lijn**  
Door het Hartis rapport is eventuele doorverwijzing goed onderbouwd.
- ♥ **Ondersteuning van Hartis Medisch Team**  
Cardioloog en arts geven advies.
- ♥ **Vergoeding door alle zorgverzekeraars**  
Hartis heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor vergoeding van de dienstverlening.
- ♥ **ISO 27001/ISO 27701/NEN 7510**



Bij **30%** van de gemonitorde patiënten is een afwijking terug te vinden in het ECG.



Bij **85%** van de patiënten met een afwijking in het ECG, kan de huisarts de patiënt zelf behandelen.

### Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op. Ook voor u brengen we zorg op afstand graag dichterbij.

### Hartis Telezorg B.V.

Herenweg 43 | 3625 AB Breukeleveen | Tel: 088 - 202 46 46 | [helpdesk@hartis.nl](mailto:helpdesk@hartis.nl) | [www.hartis.nl](http://www.hartis.nl)