



HART AAN DE SLAG VOOR UW PRAKTIJK

Harritme-diagnostiek op afstand




DE PRAKTIJK



DE FUNCTIES



DE STAPPEN

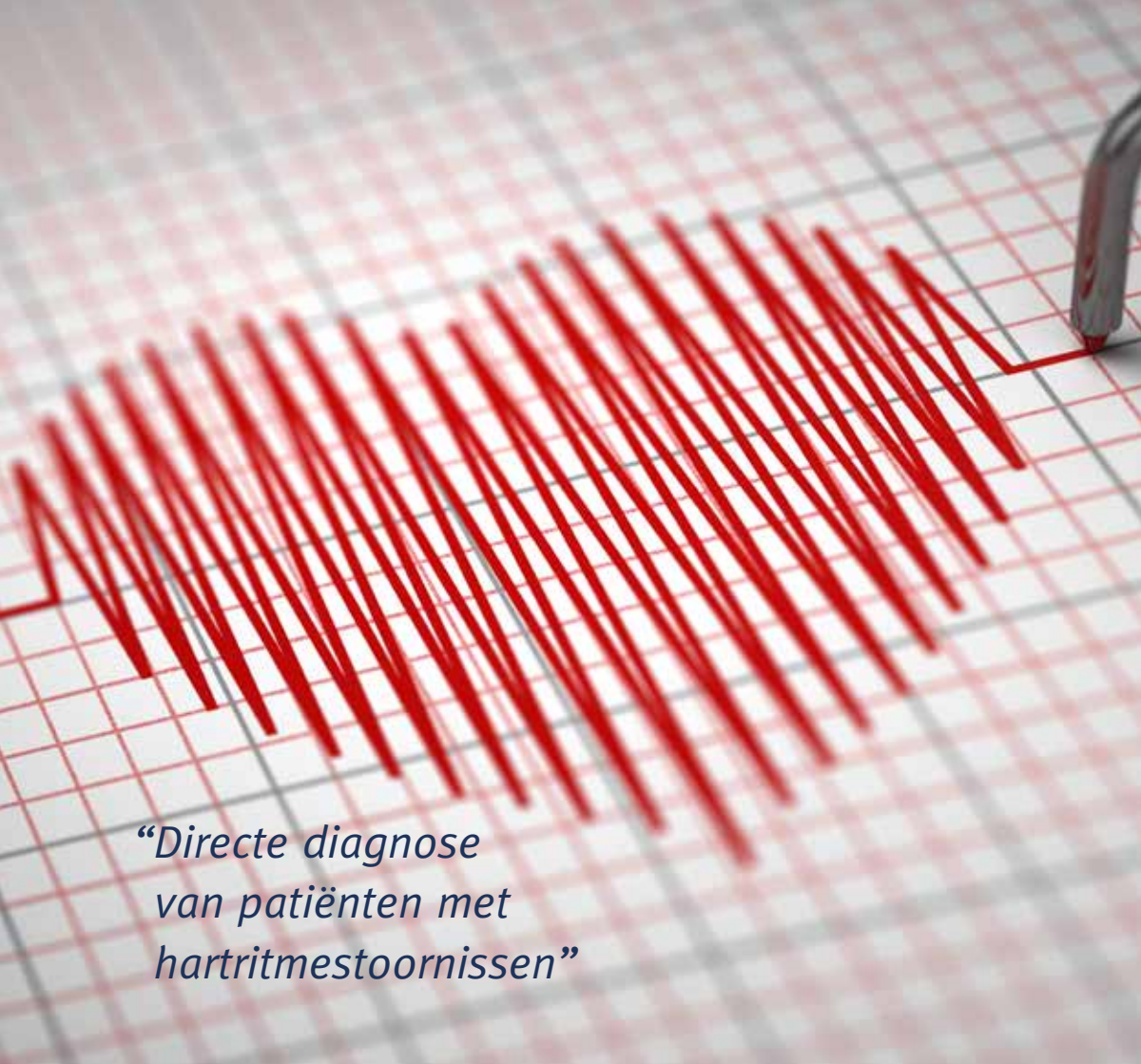

“Directe diagnose van patiënten met hartritmestoornissen”

Hartis in uw praktijk

Hartritmestoornissen zijn vaak lastig vast te stellen. Kunt u als huisarts zelf behandelen of moet u juist doorverwijzen? Op die vraag krijgt u nu een goed antwoord: met de Hartis dienstverlening en bijbehorende Holter. Met deze compacte, gebruikersvriendelijke ECG recorder en onze uiteindelijke rapportage heeft u voldoende in handen om bij hartritmestoornissen de juiste diagnose te stellen.

Hartis Medisch Centrum is gespecialiseerd in directe diagnostiek van patiënten met hartritmestoornissen. Met de Hartis Holter bieden wij u het juiste instrument om de elektrische activiteit van het hart te registreren en eventuele afwijkingen van het hartritme op te sporen.

Belangrijk voor de patiënt

Uw patiënt draagt de hartis holter gedurende een bepaalde tijd bij zich. Bij klachten zoals o.a. hartkloppingen, hartoverslag en pijn op de borst kan de patiënt zelf het electrocardiogram (ECG) markeren. Daarnaast noteert de patiënt het tijdstip en de activiteiten rondom

het moment van de klacht in het bijgeleverde dagboek. Na afloop analyseren en beoordelen specialisten van het Hartis Medisch Centrum het ECG en voorzien de uitslag indien nodig van advies. U ontvangt de uitslag digitaal en kunt daarmee goed bepalen of u zelf kunt behandelen of doorverwijzing naar een tweede lijn nodig is.

Wilt u advies?

Wilt u over individuele gevallen overleggen met ons cardiologisch team of advies over mogelijke behandelingen, dan kan dat tijdens ons dagelijkse collegiale spreekuur of tijdens een telefonisch intercollegiaal overleg.



DE PRAKTIJK



DE FUNCTIES



DE STAPPEN



*“Eenvoudige
markering
door één
druk op
de knop”*

De Hartis ECG opties



Holter ECG-registratie (24 uur, 48 uur of 72 uur)

De Holter functie registreert het hartritme van uw patiënt gedurende de door u voorgeschreven periode.



Event ECG-registratie (7 of 14 dagen)

Voor monitoring over een langere periode kiest u voor de optie van een 7- of 14 daagse registratie van het ECG. Bij klachten markeert de patiënt deze eenvoudig in het ECG door één druk op de knop.



Rust ECG-registratie

Een 12 afleidingen rust ECG van 30 seconden geeft informatie over eventuele structurele en functionele aandoeningen van de hartspier.



Spoed-ECG

Een spoed ECG is de vierde functie van de Hartis Holter en kan onder bepaalde omstandigheden worden gekozen. De registratie wordt dan met voorrang en spoed behandeld. U ontvangt de uitslag digitaal met direct aanvullend intercollegiaal overleg.



DE FUNCTIES

DE STAPPEN



“U ontvangt het diagnoserapport binnen twee werkdagen in uw HIS”

Het gehele proces

Stap 1. Aansluiten

De patiënt wordt aangesloten op de Hartis Holter. Dit kunt u zelf doen als u de holter een eigen beheer heeft, of laten doen door een uitgiftepunt bij u in de buurt. Voor een instructie van het aansluiten van een patiënt hebben wij een online instructie beschikbaar. Tevens komen wij van te voren instructie geven in uw praktijk.

Stap 2. Registratie

Gedurende de door u voorgeschreven periode draagt de patiënt de Hartis Holter bij zich. De holter registreert dag en nacht het hartritme. Op het moment dat de patiënt klachten heeft drukt hij op de knop van de holter. Daarmee markeert hij het ECG. De patiënt noteert in het meegegeven dagboek de activiteit op het moment van de klacht. Na afloop van de voorgeschreven periode levert de patiënt de holter en het dagboek in bij u of bij het uitgiftepunt waar hij de holter heeft opgehaald.

Stap 3. Uitlezen Hartis Holter

Indien u de Hartis Holter in eigen beheer heeft, sluit u de ingeleverde holter aan op uw computer. Het ECG wordt met behulp van de meegeleverde Hartis Software uitgelezen en beveiligd verzonden naar het Hartis medisch centrum. Het bijbehorende, door de patiënt ingevulde, dagboekje stuurt u ons per fax of mail. Indien de holter is meegegeven door een uitgiftepunt, verzorgt dit uitgiftepunt het uitlezen en versturen van het ECG voor u.

Stap 4. Rapportage

Het medisch team van Hartis beoordeelt het ECG en stelt het diagnoserapport op. U ontvangt dit rapport binnen twee werkdagen via een digitale beveiligde omgeving. Het rapport is in te lezen in uw HIS. Het rapport bestaat uit de vraagstelling, een samenvatting van de bevindingen en de conclusie. Een uitgebreide ECG rapportage is indien gewenst beschikbaar.



De Hartis Holter

♥ Vier functies

Één apparaat met vier functies voor de registratie van hartritmestoornissen.

♥ Continue registratie

De Hartis holter registreert continu het hartritme, ook bij een Event ECG registratie.

♥ Snelle uitslag direct in uw HIS

Wij versturen de uitslag binnen 48 uur. De uitslag wordt beveiligd digitaal verzonden en is direct in uw HIS in te lezen.

♥ Efficiënte doorverwijzing naar de tweede lijn

Door het Hartis rapport is eventuele doorverwijzing goed onderbouwd.

♥ Ondersteuning van Hartis Medisch Team

Cardioloog en arts geven advies.

♥ Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Hartis heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor vergoeding van de dienstverlening.



Bij 30% van de gemonitorde patiënten is een afwijking terug te vinden in het ECG.



Bij 85% van de patiënten met een afwijking in het ECG, kan de huisarts de patiënt zelf behandelen.

Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op. Ook voor u brengen we zorg op afstand graag dichterbij.

Hartis Medisch Centrum

Herenweg 43 | 3625 AB Breukeleveen | Tel: 088-045 06 60 | helpdesk@hartis.nl | www.hartis.nl